

Příbalový leták

NACLENS

Enzymatické tablety

Návod k použití – Pro čištění všech typů měkkých a plynopropustných (tvrdých) kontaktních čoček.

Tento výrobek obsahuje účinnou látku schopnou odstraňovat bílkoviny a další usazeniny, které se hromadí na čočce při každodenním nošení. Enzymové tablety jsou účinné proti bílkovinám, tukovým mucinům a usazeninám vápníku. Doporučujeme používat enzymové tablety alespoň jednou týdně.

Instrukce pro použití u měkkých kontaktních čoček

Instrukce pro obecné použití (víceúčelový roztok)

1. Umyjte a opláchněte svoje ruce.
2. Nalijte do pouzdra víceúčelový roztok.
3. Přidejte jednu enzymatickou tabletu.
4. Vložte kontaktní čočky do příslušných košíčků.
5. Nechte čočky v roztoku přes noc.
6. Před vložením vašich čoček do očí následující den je důkladně opláchněte víceúčelovým roztokem.

Instrukce pro použití s peroxidovým roztokem

- Umyjte a opláchněte svoje ruce. Nalijte peroxidový roztok do příslušného pouzdra. Zároveň vložte enzymatickou tabletu. Pokud používáte neutralizační tablety, vložte je do pouzdra společně s tabletou enzymatickou a pokračujte dle instrukcí k peroxidovému roztoku.

- Před použitím čoček následující den je důležité je opláchnout alespoň základním solným roztokem na kontaktní čočky.

Instrukce pro použití u plynopropustných (tvrdých) čoček

- Postupujte podle instrukcí pro obecné použití při užití víceúčelového, nebo solného roztoku pro plynopropustné (tvrdé) čočky.

- Před použitím čoček následující den je opláchněte tím samým, čistým roztokem.

Varování:

- Uchovávejte do teploty 35°C a mimo dosah dětí.
- Nezapomeňte opláchnout kontaktní čočky roztokem po použití enzymatických tablet.
- Nepolykejte enzymatické tablety!
- Při trvalém podráždění přestaňte tablety používat a kontaktujte svého očního specialistu.
- Nepoužívejte enzymatické tablety, pokud jste alergičtí na některou jejich složku.

Složení:

Chlorid sodný, fosforečnan sodný, subtilisin 1,5 mg

Výrobce: Disop, Avda, Valdelaparra, 31 - A, 28108 Madrid, Španělsko.

Dovozce: Wixi s.r.o., Revoluční 1017, Poděbrady - www.wixi.cz

Revize textu: 12/09/2009
